




EXray[®] 20

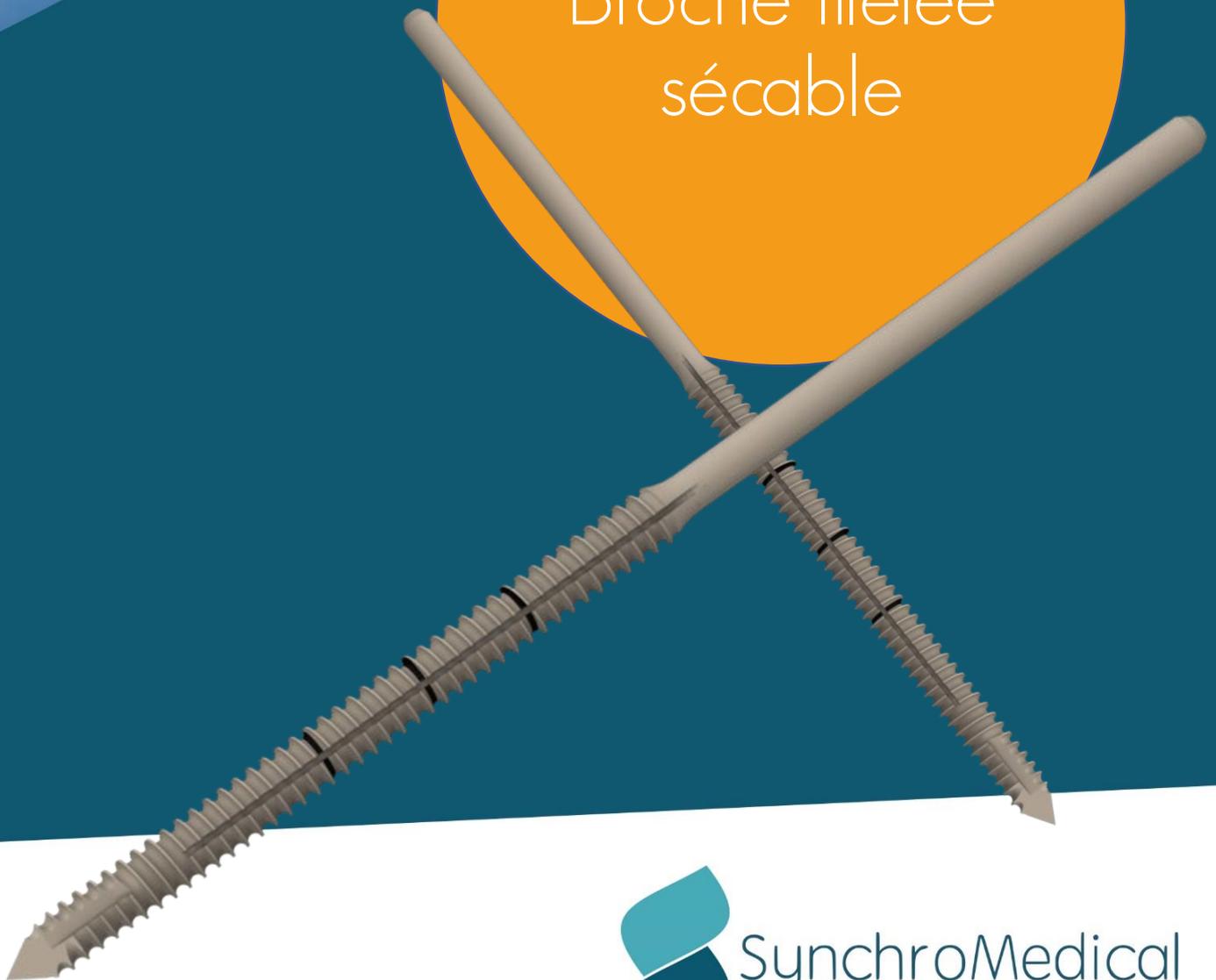

Broche filetée
sécable



SynchroMedical

The interphalangeal reference

EXray® 20 PEEK

Broche filetée sécable

DESCRIPTION

La vis EXRAY® 20 a été développée comme une vis sécable. Le perçage de l'implant est préparé avec un foret de 2 mm. La broche se compose d'une pointe trocart, d'une partie filetée et d'un diamètre plus étroit pouvant être connecté à un outil électrique de chirurgie.

L'EXRAY® 20 a un filetage continu non compressif Ø2,5 mm. Les 3 marquages sont positionnés à 15 mm, 20 mm et 25 mm. La longueur totale de la partie filetée est de 30 mm. Une fois implantée, l'excédent de longueur est enlevé à l'aide d'une lame de scie.

Les broches filetées EXRAY® 20 sont fabriquées en PEEK selon la norme ASTM F2026.

- Préparation simple
- Vis ajustable en longueur
- Utilisation pour renfort des ostéotomies
- Révision simplifiée
- Broche filetée en PEEK radiotransparent
- Le module d'élasticité du PEEK se rapproche de celui de l'os.



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implant

PW2060..... L 60 mm



Instruments

	AO20ST100	MÈCHE
	PW9010	CANON DE PROTECTION
	HV9016	EXTRACTEUR DE VIS

L'extracteur de vis avec un pas à gauche (Art. HV9016) est utilisé pour l'ablation.