

ToeGrip® Evo

Adapté
anatomiquement
sur l'expérience de
plus de 50'000
ToeGrip® Classic



SynchroMedical

The interphalangeal reference

ToeGrip® Evo

Implant interphalangien

DESCRIPTION


L'implant ToeGrip® EVO est constitué d'un implant monobloc avec trois bras intramédullaires flexibles de chaque côté. Les bras sont insérés dans chacune des phalanges proximale et distale.

Les bras sont reliés par une structure cylindrique avec un décalage de hauteur sagittale entre la phalange proximale et distale pour reproduire l'anatomie de l'orteil.

L'ancrage de l'implant repose sur un contact à ajustement serré, soutenu par sa forme effilée et ses macrostructures, qui se sont solidement ancrées une fois impactées.

La stabilité primaire et la prévention de tout déplacement sont essentielles pour une consolidation osseuse réussie.

Le ToeGrip® EVO est fabriqué en PEEK selon la norme ASTM F2026

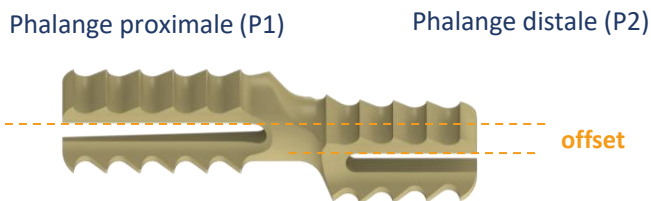

Preuve clinique

Le ToeGrip® Classic a plus de 10 ans d'expérience clinique avec des publications dans des revues avec comité de lecture. Depuis 2010, plus de 50 000 cas ont été traités avec succès.

Publications

Interphalangeal Arthrodesis of the Toe With a New Radiolucent Intramedullary Implant.

Foot & Ankle Specialist Review. Dec 2015

Diebold P, Rocher H, Determe P, Cermolacce C, Guillo S, Averous C, Lieber Wackenheim F.

A Midterm Review of Lesser Toe Arthrodesis With an Intramedullary Implant.

Foot & Ankle Specialist Review. Oct 2017















James Lee Harmer, FCPodS, MSc, BSc(Hons), Anthony Wilkinson, FCPodS, MSc, DpodM, and Anthony John Maher, FCPodS, MSc, BSc(Hons).

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implants

TGEXS00	ToeGrip® EVO EXTRA-SMALL 0°
TGEXS10	ToeGrip® EVO EXTRA-SMALL 10°
TGESS00	ToeGrip® EVO SMALL 0°
TGESS10	ToeGrip® EVO SMALL 10°
TGEMM00	ToeGrip® EVO MEDIUM 0°
TGEMM10	ToeGrip® EVO MEDIUM 10°

Instruments

	TG0240-Starter	COMPACTEUR P1 - Starter
	TG0240-XS	COMPACTEUR P1 – XS
	TG0240-SS	COMPACTEUR P1 – S
	TG0240-MM	COMPACTEUR P1 – M
	TG0010	FRAISE À CALCAR
	HV9010	MANCHE AO
	TG0203	FOURCHETTE DE RÉDUCTION
	TG0020	PORTE-IMPLANT TAILLE XS 0°
	TG0025	PORTE-IMPLANT TAILLE XS 10°
	TG0021	PORTE-IMPLANT TAILLE S 0°
	TG0026	PORTE-IMPLANT TAILLE S 10°
	TG0022	PORTE-IMPLANT TAILLE M 0°
	TG0027	PORTE-IMPLANT TAILLE M 10°
	TGE9010	ToeGrip® EVO CONTAINER À INSTRUMENTS