



EXray[®] 20



Broche filetée
sécable



SynchroMedical

The interphalangeal reference

EXray® 20 PEEK

Broche filetée sécable

DESCRIPTION

La vis EXRAY® 20 a été développée comme une vis sécable. Le perçage de l'implant est préparé avec un foret de 2 mm. La broche se compose d'une pointe trocart, d'une partie filetée et d'un diamètre plus étroit pouvant être connecté à un outil électrique de chirurgie.

L'EXRAY® 20 a un filetage continu non compressif Ø2,5 mm. Les 3 marquages sont positionnés à 15 mm, 20 mm et 25 mm. La longueur totale de la partie filetée est de 30 mm. Une fois implantée, l'excédent de longueur est enlevé à l'aide d'une lame de scie.

Les broches filetées EXRAY® 20 sont fabriquées en PEEK selon la norme ASTM F2026.

- Préparation simple
- Vis ajustable en longueur
- Utilisation pour renfort des ostéotomies
- Révision simplifiée
- Broche filetée en PEEK radiotransparent
- Le module d'élasticité du PEEK se rapproche de celui de l'os.



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implant

PW2060.....L 60 mm



Instruments

	AO20ST100	MÈCHE
	PW9010	CANON DE PROTECTION
	HV9016	EXTRACTEUR DE VIS

L'extracteur de vis avec un pas à gauche (Art. HV9016) est utilisé pour l'ablation.